



## Bezpečnostní pokyny pro prevenci zranění!



- > Dbejte na dostatek chladicího média přímo na ošetřovaném místě!
- > Nástroj Piezomed používejte za nepřerušovaného pohybu násadce!
- > Na nástroj Piezomed nevyvíjejte příliš silný tlak. V opačném případě může dojít k zahřátí nebo zlomení nástroje Piezomed a tím ke zranění pacienta.
- > S nástrojem Piezomed neprovádějte pákový pohyb.
- > Nástroj Piezomed nenechávejte nikdy volně kmitat bez chladicího média.

Form-Nr. 50845 ACZ  
Rev. 000 / 10.09.2014  
Änderungen vorbehalten

