



Implant-clean Tip Paro



11Q

 Q-Link

11

 W&H

Deutsch

Spitze zur effizienten und schonenden Reinigung von Implantaten und den dazugehörigen Restaurationen.

English

Tip for the efficient and careful cleaning of implants and the attendant restorations.

Español

Punta para la limpieza eficaz y cuidadosa de los implantes y de sus restauraciones.

Português

Ponta para a limpeza eficaz e protetora de implantes e restauros respetivos.

Français

Insert pour le nettoyage doux et efficace des implants et leurs restaurations.

Italiano

Punta per una pulizia efficiente e delicata degli impianti e dei relativi restauri.

Nederlands

Tip voor de efficiente en behoedzame reiniging van implantaten en de bijbehorende restauraties.

Magyar

Implantátumok és az ezeken levő pótlások hatékony és kímélő tisztítására szolgáló hegy.

Český

Nástavec pro efektivní a šetrné čištění implantátů a souvisejících nadstaveb a restaurací.

Slovenski

Konica za učinkovito in nežno čiščenje implantatov in pripadajočih restavracij.

Srpski

Vrh za efikasno i preventivno čišćenje implantata i odgovarajućih restauracija.

Türkçe

İmplantlar ve bunlara ait restorasyonların etkili ve koruyucu temizliği için uç.

ελληνικά

Ακροφύσιο για αποτελεσματικό και ήπιο καθαρισμό εμφυτευμάτων και των σχετικών αποκαταστάσεων.

български

Накрайник за ефективно и нежно почистване на импланти и съответното възстановяване.

Русский

Насадка для эффективной и щадящей очистки имплантатов и соответствующей реставрации.

中国

用于有效且轻柔地清洁种植体及相关修复的工作尖。

Shqip

Majë për pastrimin efikas dhe delikat të implanteve dhe të restaurimeve përkatëse.

Hrvatski

Nastavak za učinkovito i nježno čišćenje implantata i pripadajućih restauracija.

Slovensky

Špička na efektívne a šetrné čistenie implantátov a príslušných reštaurovaných častí.

Polski

Końcówka do skutecznego i delikatnego czyszczenia implantów i odpowiednich uzupełnień.

Română

Ac pentru curățarea eficientă și delicată a implanturilor și a restaurărilor acestora.

ภาษาไทย

ส่วนปลายสำหรับการทำความสะอาดรากฟันเทียมและสำหรับการอุดฟันชั่วคราวอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

日本語

インプラントの効率的で慎重な清掃および付随する修復のためのチップ。



Manufacturer

**W&H Dentalwerk
Bürmoos GmbH**

Ignaz-Glaser-Straße 53
5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0

f + 43 6274 6236-55

office@wh.com

wh.com



0297

