




# Perio Tip

## Paro

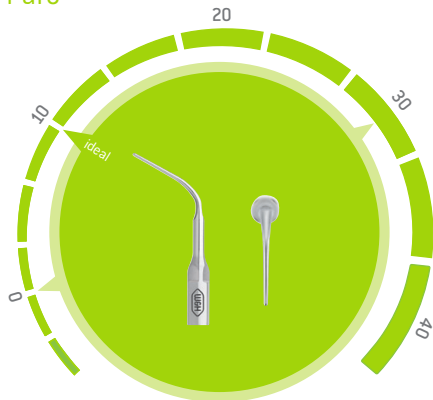

- |     |  |         |
|-----|--|---------|
| 1PQ |  | Q-Link  |
| 1P  |  | W&H     |
| 1PS |  | Satelec |



## Deutsch

Entfernung von subgingivalen Ablagerungen, besonders geeignet für tiefe Parodontaltaschen.

## English

Removal of subgingival deposits, especially suitable for deep periodontal pockets.

## Español

Eliminación de depósitos subgingivales, especialmente adecuado para bolsas periodontales profundas.

## Português

Remoção de depósitos sub-gengivais, especialmente adequado para bolsas periodontais profundas.

## Français

Élimination des dépôts sous-gingivaux, particulièrement dans les poches parodontales profondes.

## Italiano

Eliminazione di depositi subgingivali, adatta in particolare per tasche parodontali profonde.

## Nederlands

Verwijdering van subgingivale afzettingen, uitermate geschikt voor diepe parodontale pockets.

## Magyar

Szubgingivális lerakódások eltávolításához, különösen alkalmas mély parodontális tasakokhoz.

## Český

Nástavec vhodný k odstraňování subgingiválních konkrementů a obzvláště vhodný pro hluboké parodontální kapsy.

## Slovenski

Odstranjevanje subgingivalnih oblog, zlasti primerna za globoke parodontalne žepke.

## Srpski

Skidanje subgingivalnih naslaga, posebno pogodan za duboke parodontalne džepove.

## Türkçe

Subgingival birikintilerin temizliği için; özellikle derin parodontal cepler için uygundur.

## ελληνικά

Αφαίρεση των υποουλικών επικαθήσεων.  
Ενδείκνυται ιδιαίτερα για περιοδοντικούς θύλακες  
μεγάλου βάθους.

## български

Отстраняване на сублингвални отлагания,  
особено подходящ за дълбоки пародонтални  
джобове.

## Русский

Для удаления отложений поддесневого  
зубного камня, идеально подходит для  
обработки глубоких пародонтальных карманов.

## 中国

去除龈下结石，尤其适用于牙周袋较深的患者。

## Shqip

Heqje e depozitimeve nën mishrat e dhëmbëve, veçanërisht e përshtatshme për xhepa të thellë periodontalë.

## Hrvatski

Uklanjanje naslaga u subgingivalnom području, posebice prikladno za duboke parodontalne džepove.

## Slovensky

Odstránenie subgingiválnych usadenín, obzvlášť vhodné pre hlboké parodontálne vačky.

## Polski

Usuwanie złogów poddziąsłowych, szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku głębokich kieszonek dziąsłowych.

## Română

Îndepărtarea depunerilor subgingivale, potrivit în special pentru pungii parodontale adânci.

## ภาษาไทย

การขจัดคราบสะสมใต้เหงือกออก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาด  
สะอาดร่องลึกปริทันต์

## 日本語

歯肉縁上の歯垢の除去、特に深い歯周ポケットに最適。



## Manufacturer

**W&H Dentalwerk  
Bürmoos GmbH**

Ignaz-Glaser-Straße 53  
5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0

f + 43 6274 6236-55

office@wh.com

wh.com



0297



135°C  
SSS