



Co je třeba vědět – optimální hygiena a péče



Příprava chirurgických násadců/kolénkových násadců a chirurgických motorů W&H

POKYNY K PŘÍPRAVĚ

Tato doporučení pro hygienu a péči platí zejména pro převodové nástroje a chirurgické motory W&H.

Převodové nástroje a motory s tímto symbolem lze tepelně čistit a dezinfikovat v čistícím a dezinfekčním přístroji.

Převodové nástroje a dentální motory s tímto symbolem jsou schváleny pro sterilizaci.

Všeobecné pokyny

- > Násadec/kolénkový násadec čistíte a dezinfikujete okamžitě po každém ošetření.
- > Doporučuje se použít ochranný oděv (rukavice odolné proti zátřhům, brýle a příp. ústní roušku).
- > Dodržujte podrobné údaje v návodu k použití výrobce.
- > Pro převodové nástroje a chirurgické motory W&H používejte certifikované a přezkoušené dezinfekční prostředky a dodržujte příslušné dávkování a dobu působení.
- > Použité dezinfekční prostředky nesmí obsahovat chlór.
- > Pro pohon používejte čistý a suchý vzduch.
- > Společnost W&H doporučuje použití demineralizované vody.
- > Dbejte podrobných informací uvedených na stránce wh.com

1

PŘÍPRAVA

1



příp. dezinfekce otřením




příp. dezinfekce otřením

2

ČIŠTĚNÍ / SUŠENÍ

2

Ručně

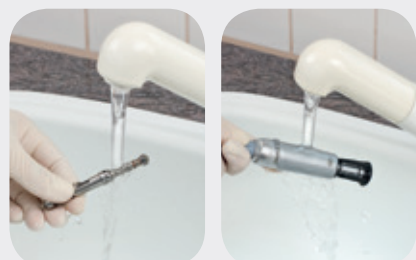

Strojově



3

DEZINFEKCE / SUŠENÍ

3



Vizuální kontrola



Dbejte pokynů výrobce čistícího a dezinfekčního přístroje!

Uložte složené převodové nástroje na příslušné adaptéry nebo je v rozloženém stavu vložte do čistícího a dezinfekčního přístroje.



4


PROMAZÁNÍ

4

Ručně



Strojově

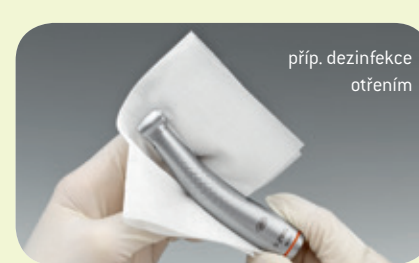

příp. dezinfekce otřením

Četnost péče:

- > po každém vnitřním čištění
- > před každou sterilizací

5

BALENÍ / STERILIZACE

5



Společnost W&H doporučuje používat sterilizátor v souladu s normou EN 13060. Zkontrolujte, zda jsou ošetřené položky po termodezinfekci/sterilizaci suché.

6

VYJMUTÍ

6



7

ULOŽENÍ

7



Bez prachu, čistě a suché.

Bližší informace naleznete na stránce wh.com/hygiene